

Feel the Rhythm

Refit.

Smart Facial Rejuvenation & Body Shaping System

All in one



- Körperformung
- Cellulite-Reduktion
- Face Lifting & Straffung
- Falten-Reduktion

RF-Technologie auf dem neuesten Stand!

- ▶ Die Radiofrequenztechnik (RF-Technik) ist eine sanfte Methode zur Hautstraffung. Im behandelten Gewebe wird eine Tiefenwärme erzeugt, die zur Kollagenneubildung führt und die Haut nachhaltig verjüngt sowie das Hautbild sichtbar verbessert.
- ▶ Störende Ansammlungen von Fett werden reduziert und auch Cellulite wird langanhaltend verringert.
- ▶ Durch die Behandlung treten die Körperkonturen besser hervor.
- ▶ Bei der Radiofrequenz-Behandlung handelt es sich um ein Verfahren, bei dem hochfrequenter Strom im Gewebe in Wärme umgesetzt wird (Diathermie).
- ▶ Durch die multipolare RF-Anwendung bewirkt es kontrollierten Energiefokus in den dermalen und subkutanen Hautschichten.
- ▶ Die Energie konzentriert sich ausschließlich auf die Behandlungszone und führt zu einer simultanen Erhitzung der oberflächlichen und tiefer liegenden Gewebeschichten.
- ▶ Die multipolare Radiofrequenz-Applikation bietet wichtige Vorteile, da die Energie unmittelbar im Behandlungsareal fokussiert wird.
- ▶ Zudem benötigt die multipolare Anwendung weniger Energie für mehr Sicherheit und eine angenehme, schmerzfreie Behandlung.


Hautverjüngung, Fettreduktion und Gewebstraftung mittels Radiofrequenz

- ▶ Das Zusammenspiel aus multipolarer RF-, Vakuum- und LED-Technologie erzielt kompetente Lifting- und Straffungseffekte, Cellulite-Reduktion und Körperformung. Die Kombination dieser drei Funktionen ermöglicht beste Ergebnisse ohne Schmerzen und ohne Ausfallzeit.
- ▶ Die RF Energie liefert thermische Energie in die Dermis (Faserreiches Bindegewebe) und in die Subcutis (Unterhautfettgewebe), fördert einen schnelleren Stoffwechsel, strafft das Bindegewebe und verbessert die Hautelastizität.
- ▶ Das Vakuum erhöht die Blutzirkulation, reduziert den Haftkontakt zwischen den Fettzellen und modelliert so den Körper.
- ▶ Die speziell ausgewählten Wellenlängen des LED Lichtes von 640nm und 460nm fördern die Durchblutung und verbessern den Hautton.




Die Behandlung und ihre Vorteile

- ▶ Eine Sitzung unter Anwendung der Radiofrequenz dauert für gewöhnlich etwa 20 bis 30 Minuten. Je nach Ausmaß und Größe des Fettdepots umfasst der gesamte Behandlungszyklus mehrere Sitzungen.
- ▶ Die Patienten spüren in der Regel lediglich ein leichtes Wärmegefühl inkl. angenehmer Vakuum Massage. Die Behandlung erfolgt ambulant, ohne Betäubung. Die Erwärmung der Hautoberfläche ist vergleichbar mit einer Hot-Stone-Massage.
- ▶ Der Vorteil des Refits gegenüber anderen nicht-invasiven Methoden zur Fettreduktion ist, dass die Radiowellen in tiefere Hautregionen mit 0,8 MHz eindringen können und einen zusätzlichen gewebestraffenden Effekt erzielen.
- ▶ Durch die erzeugte Tiefenwärme kommt es zu einem „shrinking“ Effekt, einem Zusammenschrumpfen des Bindegewebes. Die Unterhaut wird so wirksam und sofort sichtbar gestrafft.
- ▶ Darüber hinaus regt die Radiofrequenz-Energie die Blutzirkulation an und erhöht den Zellstoffwechsel im Bindegewebe. Konkret bedeutet dies, dass faserbildende Zellen aktiviert werden und neues Kollagen bilden.
- ▶ Die Kollagen-Produktion läuft zeitversetzt über einen längeren Zeitraum, so dass sich innerhalb der nächsten Monate der Straffungseffekt noch weiter verstärken wird.
- ▶ Die Radiofrequenztherapie ist daher nicht nur eine Methode zur Fettreduktion ohne OP, sondern sie trägt mit ihrem „Lifting von innen“ auch zum Body-Shaping bei und kann Cellulite vermindern.
- ▶ Ebenso wird der Stoffwechsel und seine Prozesse intensiv angeregt.
- ▶ Sofort nach der Anwendung kann der Patient wieder seinem gewohnten Alltag folgen, wobei direkt nach der Behandlung kein Leistungssport betrieben und Saunabesuche vermieden werden sollten.
- ▶ Leicht gerötete Haut kurz nach der Behandlung verschwindet in der Regel innerhalb weniger Minuten. Die Hautoberfläche, das umliegende Gewebe und die Nerven werden nicht geschädigt.

Der Wirkbereich

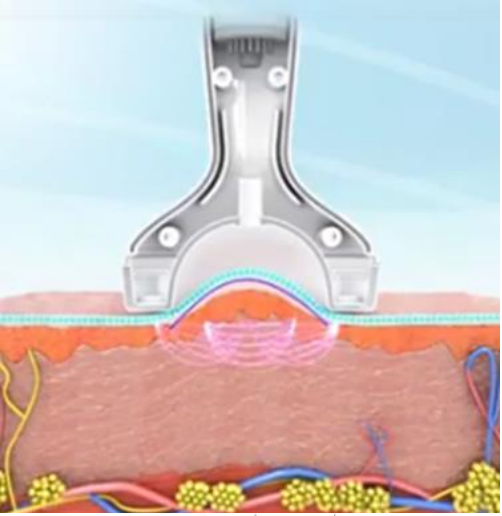

Refit
Handstück

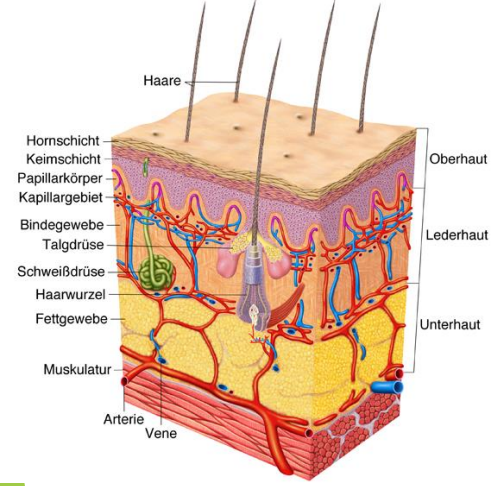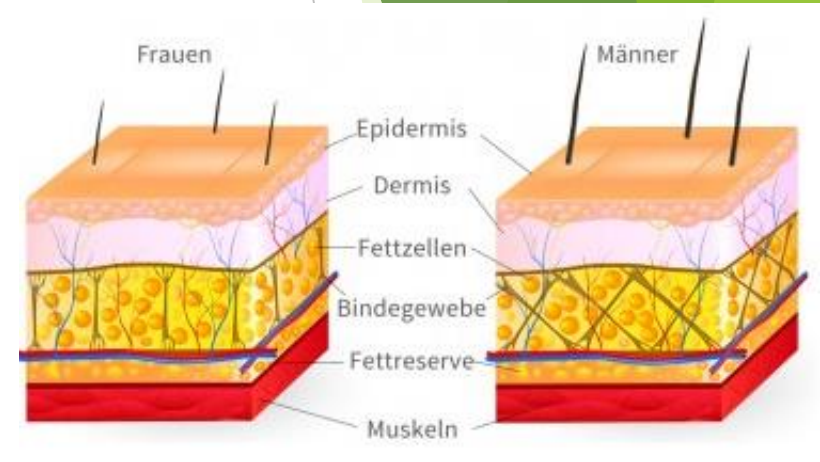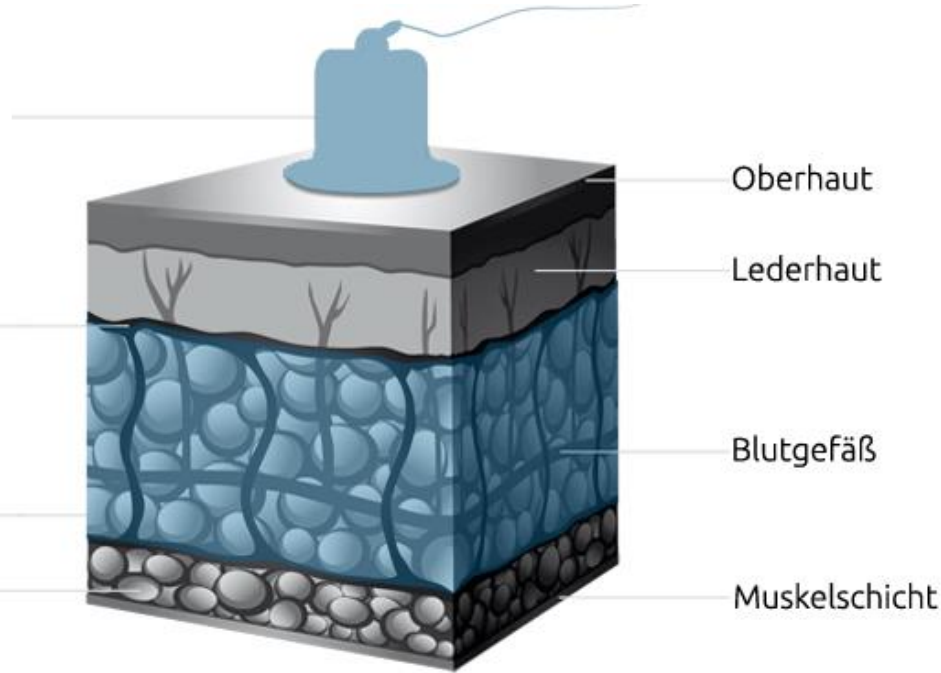

Das Fettgewebe besteht aus Fettzellen (Adipozyten), die Fette synthetisieren und in Form eines Lipidtropfens speichern. Je nach Leibesumfang tragen wir zwischen 40 und 120 Milliarden Fettzellen in uns. Etwa 70 Prozent unseres Fettgewebes ist in der Unterhaut zu finden.



Behandlungsintervalle



Bikinifigur in der Mittagspause

- ▶ Abhängig davon, ob eine Fettreduktion oder eine Hautstraffung erwünscht ist, variiert die Behandlungsdauer zwischen 20 und 30 Minuten.
- ▶ Nach dem Eingriff ist eine Rückkehr an den Arbeitsplatz oder in den Alltag sofort möglich - eine Behandlung in der Mittagspause ist daher durchaus realistisch.
- ▶ Die empfohlene Anzahl der Behandlungen für Body Contouring liegt zwischen 6 - 10 Sitzungen.
- ▶ Die Abstände zwischen den einzelnen Sitzungen betragen in der Regel zwischen 7 und 10 Tagen. Die Patienten berichten von sichtbaren Verbesserungen bereits nach der ersten Behandlungssitzung. Die empfohlene Anzahl der Behandlungen bei erschlaffter Haut liegt zwischen 4 bis 6 Sitzungen.
- ▶ Nach Beschaffenheit der Haut kann eine Verlängerung der Behandlungen notwendig sein.

Was muss ich nach der Behandlung beachten?


- ▶ Nach einem Eingriff sollte verstärkt darauf geachtet werden, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Zudem kann der Erfolg der Behandlung durch eine fettarme und zuckerfreie Diät und sportliche Aktivitäten verstärkt werden.



Präzise Benutzeroberfläche

- ▶ Die grafische Benutzeroberfläche unterstützt den Benutzer durch ein einfaches Design, eine unkomplizierte Funktionalität und eine automatische Handstückerkennung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
 - Benutzerorientiert
 - Patientenorientiert
 - Ergebnisorientiert

Einstellungen

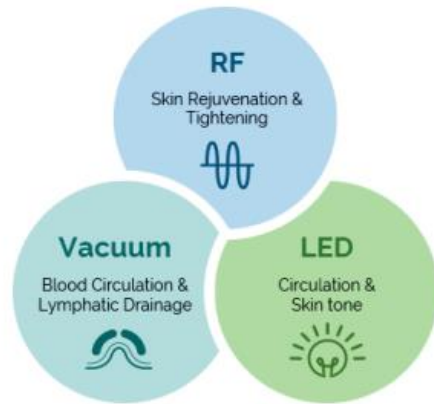





Die RF Energie liefert thermische Energie in die Dermis und Subcutis, fördert einen schnelleren Stoffwechsel, strafft die Kollagenfasern und verbessert die Hautelastizität.

Das Vakuum erhöht die Blutzirkulation, reduziert den Haftkontakt zwischen den Fettzellen und modelliert so den Körper. Zudem sorgt das Vakuum für ein tieferes Eindringen der RF Energie.

Die speziell ausgewählten Wellenlängen 640nm und 460nm fördern die Durchblutung und verbessern den Hautton.



-  Schnelle Impulse
-  Normaler Impuls
-  Langsamer Impuls
-  Kontinuierlicher Impuls

Dynamische Pulsation

Optionale Auswahl an verschiedenen Pulspegeln ist verfügbar, um Behandlungsverfahren mit minimalem Lärmpegel anzupassen.

Das Menü



RIDM-Technologie (Redesign Integrated Dynamic Movement)



Integrierte dynamische Bewegungen neu gestalten

- ▶ Durch die Unterstützung der RIDM-Technologie lassen sich Behandlungsabläufe leichter von der Hand gehen
- ▶ Es ist nicht erforderlich, die Parameter während der Behandlung regelmäßig zu ändern oder die Zeit zu überprüfen
- ▶ Mit Hilfe der RIDM-Technologie können 5-30-minütige Programme voreingestellt werden.
- ▶ Um eine bequeme Behandlungsmethode zu gewährleisten, sind die Programme in 5-Minuten-Intervallen nach Wunsch des Benutzers einstellbar.



Mehrere Handstücke

- ▶ Die Handstücke gibt es in 3 Größen (Large, Medium und Small)

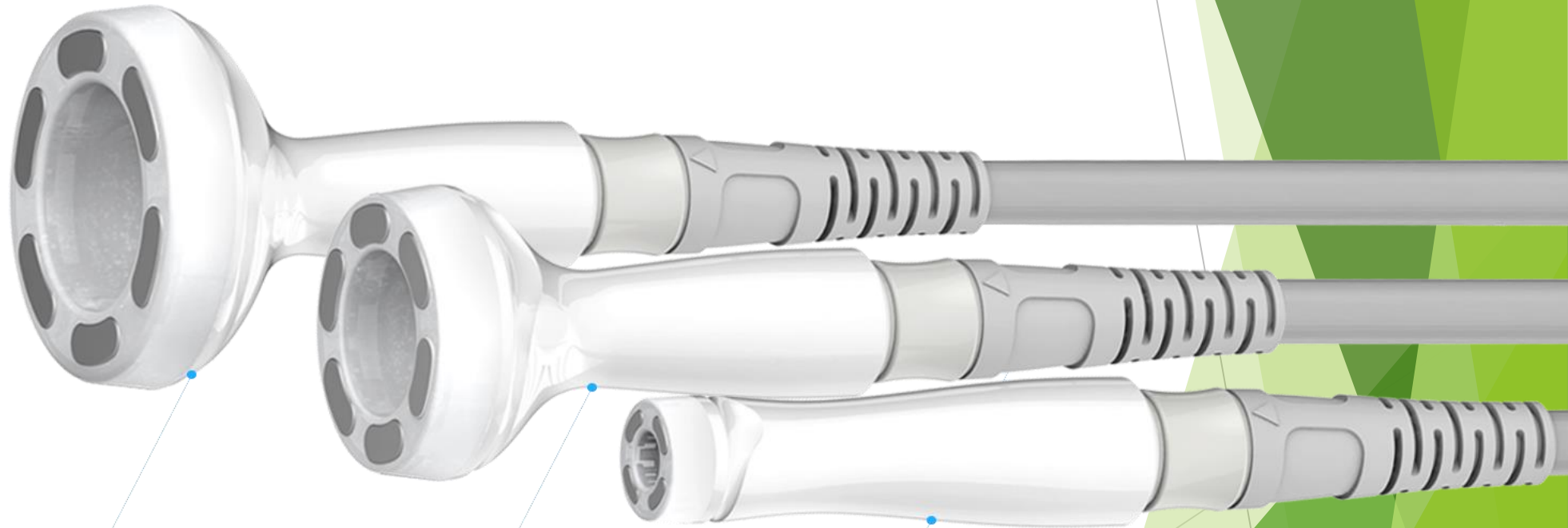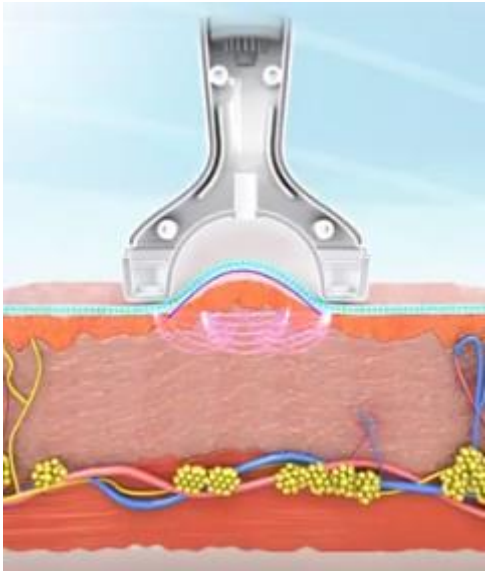

Large



Medium



Small



Behandlungsmöglichkeiten

- ▶ beginnende Hauterschaffung und Knitterfältchen
- ▶ Nasolabialfalte
- ▶ Augenpartie
- ▶ hängende Wangen
- ▶ Doppelkinn
- ▶ Eine generelle Straffung der gesamten Gesichtshaut kann bereits nach der ersten Behandlung festgestellt werden, der auf dem direkten Kollagen-Shrinking (Straffen der Kollagenfasern) beruht.

Darüber hinaus werden mit Radiofrequenz-Energie auch Figurprobleme anvisiert wie:

- ▶ lokale Fettdepots (z.B. Bauch, Hüften etc.)
- ▶ laxe Hautpartien (z.B. Oberarme)
- ▶ einem von Cellulite geprägten Hautbild

Einsatzorte



- **Kleines Handstück** für Gesicht und Halspartie
- **Mittleres Handstück** für Arme und Schenkel
- **Großes Handstück** für Rücken und Abdomen

Behandlungsabläufe




Breast




Arm




Abdomen

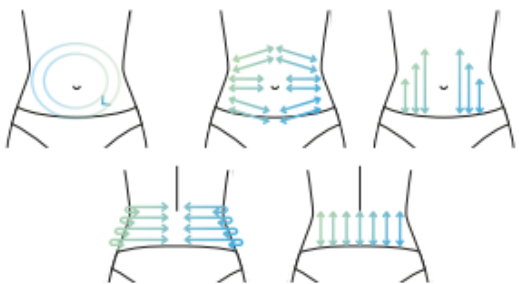

Back

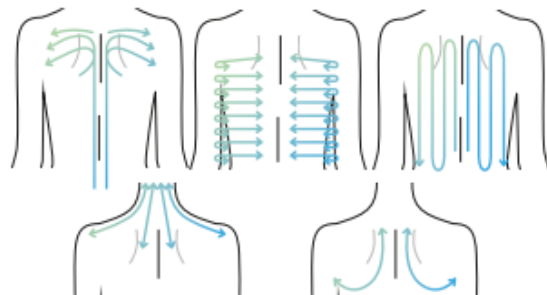

Thigh

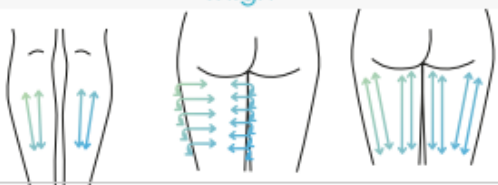

Hip



Vorher/ Nachher Bilder



Die Erstberatung



- ▶ Aufklärungsgespräch über die Behandlung und die Methodik
- ▶ Abstimmung der individuellen Behandlungsziele
- ▶ Körperversmessung vor und nach der Behandlung mittels Maßband
- ▶ Auf Wunsch: Fotografische Dokumentation
- ▶ Behandlung (20-30 Minuten - Pro Seite)
- ▶ Stoffwechselaktivierung zur Lymphfluss-Stimulation
- ▶ Termindauer: ca. 60 Minuten

Kontraindikationen

- ▶ · akute unspezifische, bakterielle bzw. virale Krankheitsprozesse, die mit starker lokaler Erwärmung oder mit Fieber einhergehen
- ▶ · implantierte Metallteile, z. B. Schrauben oder Platten, im Behandlungsbereich (ausgenommen Zahntransplantate)
- ▶ · Schwangerschaft und Wochenbett (8 Wochen nach Niederkunft)
- ▶ · stark eingeschränkte Nieren- oder Leberfunktion
- ▶ · elektrische Transplantate (z. B. Herzschrittmacher)
- ▶ · Injektion von Botox in den letzten 2 Wochen im Behandlungsbereich
- ▶ · schwere Thrombosen oder Venenentzündung
- ▶ · schwere Herzrhythmusstörungen
- ▶ · Hämophilie (sehr starke Blutungsneigung)
- ▶ · Tumore und Metastasen
- ▶ · Therapie mit z. B. Marcumar, Heparin
- ▶ · Arteriosklerose
- ▶ · Hämatome, Erguss- oder Ödem-Bildung
- ▶ · Sensibilitätsstörungen im Behandlungsbereich, sodass Ihr Wärmeempfinden stark eingeschränkt ist, z. B. akut Neuralgie
- ▶ · Knochenmarksentzündung (Osteomyelitis)
- ▶ · Akne bzw. Herpes im Behandlungsbereich

Besondere Hinweise zum Heilmittelwerbeengesetz (HWG)

Kein Heilversprechen geben!

- ▶ Aus rechtlichen Gründen weisen wir besonders darauf hin, dass bei keiner Behandlung der Eindruck erweckt werden darf, dass ein Heilungsversprechen zugrunde liegt, bzw. Linderung oder Verbesserung einer Erkrankung garantiert oder versprochen wird.
- ▶ Wir arbeiten ausschließlich im ästhetischen und kosmetischen Bereich. Daher können wir Krankheiten oder krankhafte Veränderungen, wie z. B. die Fettsucht (Fettleibigkeit als Suchtkrankheit) nicht heilen. Deshalb bieten wir Ihnen auch keine Heilung, Behandlung oder Linderung von krankhaften Beschwerden bzw. einer Erkrankung an.
- ▶ Unser stetiges Ziel ist es, die Körperformen proportionaler sowie harmonischer zu gestalten und die Kunden dabei **zu unterstützen**, Ihre Wohlfühlfigur zu erreichen.

PREISGESTALTUNG


EINZELPREIS

119,- pro Sitzung

PAKETPREISE PRO BEHANDLUNG

- ▶ 6er Paket
- ▶ 99 €
- ▶ 8er Paket
- ▶ 79 €
- ▶ 10er Paket
- ▶ 69 €

Beispiele - Preis pro Zone

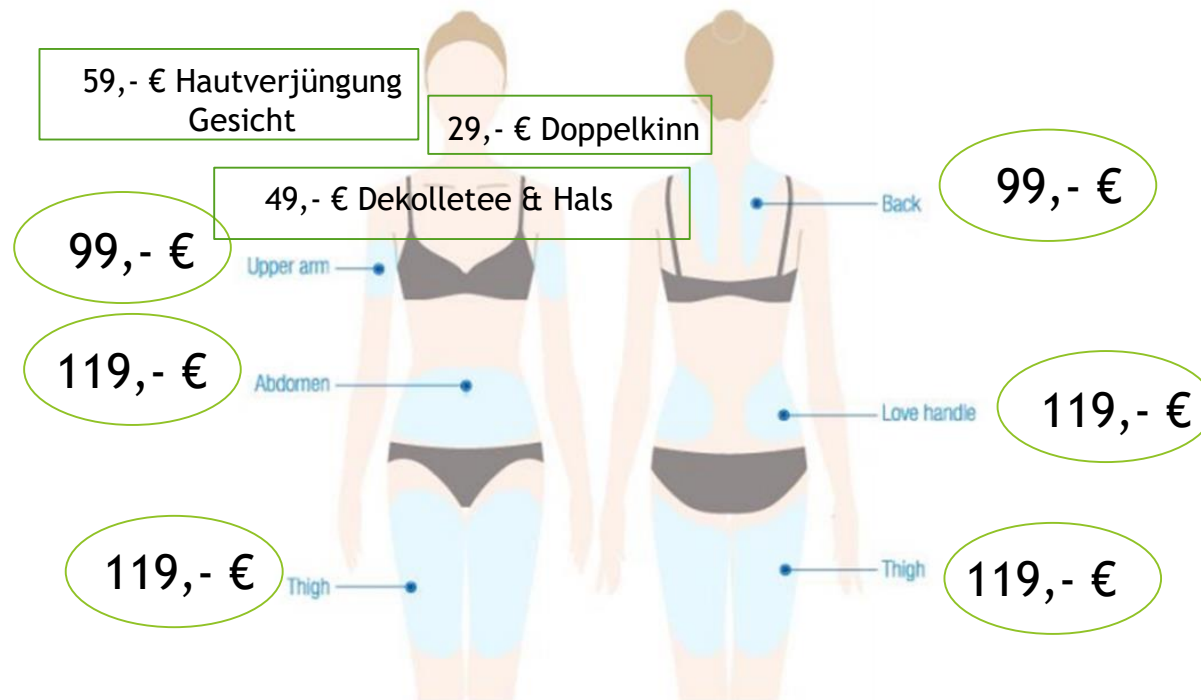

Mit der Entwicklung der Safe-Anti-Spark (Sichere Anti Funken) Technologie können Patienten und Ärzte zusätzliches Vertrauen in die Sicherheit der Behandlungsverfahren haben.

Um die Sicherheit und den Schutz des Patienten vor möglichen Funken zu gewährleisten, wurden HF-Energiekontrollen (SAS-Technologie) eingeführt.

Dies tritt im Allgemeinen bei anderen ähnlichen Geräten auf, die die HF-Technologie aufgrund instabiler Leistungspegel verwenden. Das mit SAS-Technologie ausgestattete Refit ermöglicht, bei höheren Frequenzen zuverlässig zu arbeiten.



Reinigung des Gerätes

- ▶ Das Handstück nach jeder Behandlung reinigen (Gerätedesinfektionstücher und Pfeifenreiniger)
- ▶ Den Schlauch am Ende des Tages reinigen (Pfeifenreiniger)
- ▶ Nach 40 Behandlungen den Filter wechseln



Technische Daten

- ▶ Radiofrequenz 0,8 MHz
- ▶ Leistung 70 W
- ▶ Vakuum 200mmHg
- ▶ LED Wellenlänge 640/460 nm
- ▶ Netzspannung 100-240 V; 50/60 Hz
- ▶ Gewicht 7,2 kg
- ▶ Maße 40 x 40,5 x 22 cm